

Vi ringraziamo per la numerosa partecipazione al Webinar  
**PREVENZIONE DELLE IRRITAZIONI E CURA  
DELLA CUTE PERISTOMALE**  
tenutosi martedì 22 febbraio 2022.

Potete trovare di seguito una raccolta delle risposte  
alle vostre domande più frequenti. Vi consigliamo di  
rivolgervi al vostro stomaterapista di riferimento per  
approfondimenti clinici e altre eventuali domande.



## Domande generali

### Ogni quanti giorni va sostituita la placca?

Varia a seconda del tipo di stomia e della situazione specifica, in linea generale il dispositivo monopezzo andrebbe sostituito 1-2 volte al giorno, mentre per il dispositivo 2 pezzi (sacca e placca) la placca andrebbe sostituita ogni 2-3 giorni.

### È possibile utilizzare il phon per asciugare la cute?

È sconsigliato utilizzare il calore diretto sulla cute per evitare casi di secchezza cutanea o ulteriori irritazioni. Un panno di cotone o in TNT pulito da utilizzare sulla cute intatta potrebbe essere un'alternativa migliore.

### Cosa si intende per cute peristomale e come è possibile preservarla?

La cute peristomale è la cute attorno allo stoma, che a causa delle sollecitazioni continue potrebbe essere esposta maggiormente a irritazioni e arrossamenti. La prevenzione della cute peristomale è essenziale per una gestione ottimale della stomia. I prodotti chiave per preservare la cute sono il Film protettivo che protegge la cute dagli effluenti, il Remover che facilita la rimozione dell'adesivo in maniera atraumatica senza causare lesioni meccaniche da strappo e la Pasta o l'Anello plasmabile che permettono di creare un sigillo sicuro intorno allo stoma ed impediscono agli effluenti di infiltrarsi e danneggiare la cute. Sarebbe opportuno chiedere consiglio al proprio stomaterapista di riferimento per individuare i prodotti più adatti.

### Come trattare il prurito e l'eventuale arrossamento della cute peristomale?

Il prurito della cute peristomale potrebbe essere legato a tanti fattori, e sarebbe opportuno un confronto con il proprio stomaterapista di riferimento. Un suggerimento potrebbe essere quello di utilizzare in maniera costante il Film protettivo e il Remover Brava che non contengono alcol, non bruciano a contatto con la cute e possono essere utilizzati anche in casi di cute lievemente arrossata. A questi prodotti è possibile anche affiancare l'utilizzo della Crema barriera Brava che ha un effetto lenitivo, emolliente ed idratante sulla cute. I prodotti sopraelencati non intaccano l'applicazione successiva del dispositivo.

## Domande sui prodotti

### I prodotti di supporto presentati possono provocare reazioni allergiche?

Tutti i prodotti Brava sono stati studiati e realizzati con materiali ipoallergenici e delicati sulla pelle.

### Quali sono i prodotti da usare in presenza di cicatrici chirurgiche che possono intaccare l'adesione della placca?

Potrebbe rendersi utile l'utilizzo della Pasta per appianare la superficie cutanea e preparare la superficie all'applicazione della placca.

Per una maggiore sicurezza inoltre, è possibile utilizzare i Cerotti idrocolloidi Brava disponibili in diverse forme e dimensioni e progettati per adattarsi ad ogni profilo corporeo.

Un ultimo suggerimento potrebbe essere quello di indossare la Cintura Brava, regolabile a seconda delle necessità.

### La Pasta contiene alcol? Quanto prodotto si deve applicare?

La Pasta Brava non contiene alcol, pertanto non brucia a contatto con la cute. La quantità di Pasta da applicare sulla cute dipende dal tipo di stoma. È necessaria una quantità tale da creare un sigillo sicuro intorno allo stoma e per colmare le pliche e avvallamenti.

### Qual è il principale utilizzo della Panciera? Chi la prescrive?

La Panciera è un dispositivo medico che aiuta a prevenire le ernie parastomali che si possono verificare in presenza di una stomia. La prescrizione della Panciera viene fatta dal medico specialista che deve anche effettuare un collaudo sul paziente.

### Qual è la composizione della Polvere Brava?

La Polvere è costituita da idrocolloide: ipoallergenico e delicato con la funzione di assorbire l'umidità della cute.

### Come devono essere posizionati i Cerotti elastici Brava?

Il Cerotto elastico Brava deve essere posizionato in parte sulla placca e in parte sulla cute in modo da aumentare la superficie di adesione del dispositivo di raccolta e ottenere maggiore stabilità e sicurezza.

### Come è possibile rimediare ai fastidi causati dai peli addominali sotto la placca?

I peli addominali possono creare fastidi e a volte l'uso di un rasoio elettrico per accorciarli non evita il dolore. L'utilizzo del Remover Brava aiuta ad eliminare la sensazione di fastidio e dolore quando si stacca l'adesivo poiché rende il distacco dolce ed evita l'insorgenza di lesioni meccaniche.

### Il Film protettivo in formato spray può arrecare danno allo stoma? Differisce dalla Crema barriera?

Il Film protettivo e la crema barriera hanno due funzioni diverse. Il Film protettivo spray Brava non contiene alcol, pertanto non brucia a contatto con la cute e può essere posizionato sull'area intorno allo stoma poiché è anche traspirante e si asciuga in pochi secondi senza intaccare l'adesione dell'adesivo. La Crema barriera ha un effetto idratante, emolliente e lenitivo sulla cute peristomale irritata e secca.

# Per ulteriori informazioni iscriviti gratuitamente a Coloplast Care



Coloplast Care è il servizio gratuito di supporto telefonico e online, che ti affianca per tutta la vita con l'utilizzo del tuo prodotto e integra l'assistenza e la formazione che ricevi dal tuo stomaterapista o dal tuo medico. Potrai contattarlo attraverso il numero verde gratuito di assistenza tecnica oppure online, nella privacy di casa tua quando il tuo infermiere, il tuo medico o il nostro supporto telefonico non sono disponibili.

Coloplast®  
**Care** | Il tuo servizio  
giorno dopo  
giorno



Un team di assistenza tecnica che offre supporto telefonico



Sito dedicato con consigli rilevanti e un sistema di auto-valutazione del proprio benessere (Ostomy Check)



News, consigli, ispirazione per gestire le situazioni, tramite e-mail e materiale cartaceo



Invio gratuito di campioni a domicilio in pacco anonimo



Per altri contenuti di ispirazione online e per iscriverti gratuitamente al servizio Coloplast Care inquadra il QR code con la tua fotocamera o vai su [coloplast.to/carestomia](https://coloplast.to/carestomia)

Oppure contatta il nostro servizio di assistenza tecnica al numero verde gratuito **800.064.064**

Possiamo essere più forti, se lo facciamo **insieme**.